

このたびは本品「フィットアスリート」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本「取扱い説明書」をお読みください。  
また、お読みになった後もいつでも読めるよう大切に保管してください。

## プロスポーツ選手(トップアスリート)用 ランバーサポートがついに完成!

### 1 特長


- ◆ アスリートの様々な動きに追従するフィットデザイン(2.フィットコンセプト-①)を採用。
- ◆ 三次元編み構造(ダブルラッセル生地)により、オールメッシュで高次元の通気性能が実現。
- ◆ 体表面に接する面は、特殊ポリマーのマイクロコーティングによって接着面の密着性を高め、2.フィットコンセプト-②を実現。
- ◆ 抗菌消臭作用のある素材を採用。
- ◆ US. PAT. No. US6921375B

### 2 フィットコンセプトとは

- ① 腹部ベルト(腹直筋ベルト)と骨盤ベルト(腹斜筋ベルト)のダブルベルト構造で安定した固定が実現。

#### ◆ 体表面側

マイクロコーティング  
パワーネット

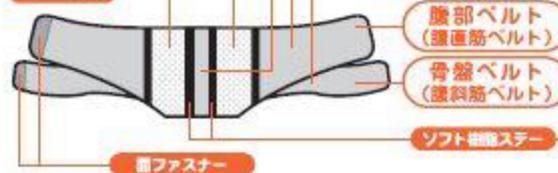

#### ◆ 外側


ハイグリップダブルラッセル(抗菌)  
パワーネット

腹部ベルト  
(腹直筋ベルト)  
骨盤ベルト  
(腹斜筋ベルト)


ソフト伸縮ステー

前ファスナー

- ② 腹部ベルト(腹直筋ベルト)と骨盤ベルト(腹斜筋ベルト)のセパレート装着により、様々な体動において腹圧を維持。体幹前屈時の安定した腹圧作用と体動時における体幹上部へのずれ防止。

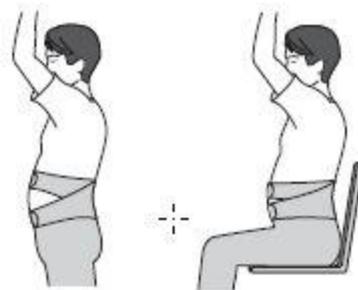


- ③ 外腹斜筋の走行と一致した骨盤ベルト(腹斜筋ベルト)が骨盤の生理的前傾状態を維持。

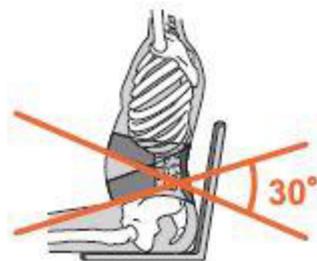


### 3 装着方法

- ① 一般的な装着の仕方

- ① 上・下/体表面側・外側を確かめてください。  
(サイズ表示のあるほうが上/外側です。)

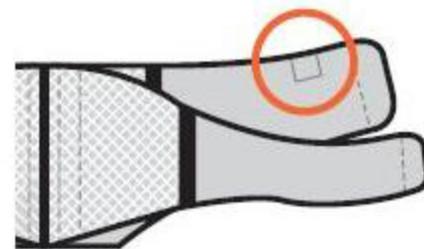

- ② 腹部ベルトの2本のステーを体型にそうように、腰部の中心に位置させます。

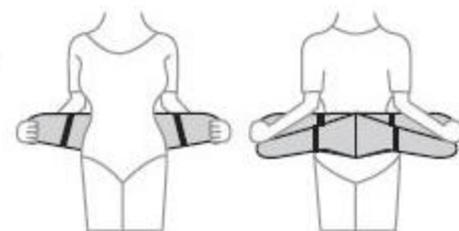



- ③ 腹部ベルト(腹直筋ベルト)が臍<sup>へそ</sup>に対し中心に位置するように十分引っ張りながら体の正面で合わせます。



- ④ 骨盤ベルト(腹斜筋ベルト)の下縁が、腸骨にかかるように十分引っ張りながら体の正面で合わせます。



- ⑤ 装着完了。  
★...臍位置  
●...腸骨位置

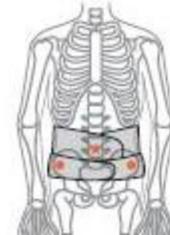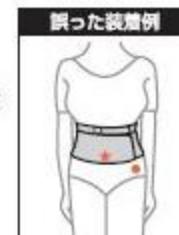

### 3 装着方法



#### 2 お腹まわりが大きい方

①～②は「1 一般的な装着の仕方」と同じです。

③腹部ベルト(腹直筋ベルト)を臍<sup>へそ</sup>よりやや上部に装着します。

④骨盤ベルト(腹斜筋ベルト)の幅の中心に腸骨を位置させ、引っ張りながら下腹部を持ち上げるようにして体の正面で合わせます。

⑤装着完了。★…臍<sup>へそ</sup>位置  
●…腸骨位置

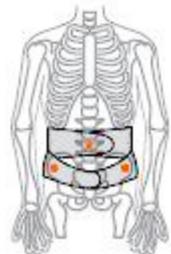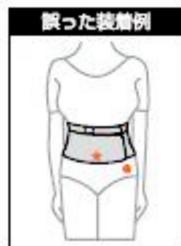

### 4 こんな時は

#### ◆お食事の時

食事や座位の際には、腹部ベルト(腹直筋ベルト)を緩めに調節すると、内臓への負担が軽減されます。

#### ◆トイレの時

トイレなどでは、骨盤ベルト(腹斜筋ベルト)だけを外すと再装着が簡単です。

### 5 注意事項

- ◆ 体表面側のマイクロコーティング部分は、強く擦りつけたり傷つけたりしないでください。コーティングが剥がれる可能性があります。
- ◆ ご自分の体型に合ったサイズをお選びください。

### 6 洗濯方法

- ◆ 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- ◆ 漂白剤、アイロン、乾燥機の使用や、ドライクリーニングは避けてください。
- ◆ 洗濯後の乾燥は陰干しにしてください。

### 7 保管方法

- ◆ 小児の手が届かない場所に保管してください。
- ◆ 直射日光や高温を避け、湿気のない風通しの良い場所に保管してください。

### 8 使用上の注意

- ◆ 本品は腰部固定以外の用途には使用しないでください。
- ◆ 本品の使用中に異常を感じた場合は使用を中断し、医師に相談してください。
- ◆ 本品の使用は、衣類などの上からの装着をおすすめします。

### 9 サイズ

サイズ	適用腰廻り
SS	55cm ~ 65cm
S	65cm ~ 75cm
M	75cm ~ 90cm
L	90cm ~ 105cm
LL	105cm ~ 120cm



### 10 品質保証

万一不都合が有りました場合は、お手数でもお買い上げの月日とお名前をお書きのうえ、現品をお送りください。送料は当社負担で、お取り替えさせていただきます。